

# uniq

LADY Condom  
Frauenkondom


## BESONDERE VORTEILE

- Ihr Partner braucht kein extra Kondom.
- Ihr Partner sieht nur die sexy Spitzen-Strumpfbänder.
- Es ist sehr sicher: die Strumpfbänder verhindern, dass das Kondom zu weit in die Vagina gedrückt wird.
- Einige Frauen haben berichtet, dass ihnen die Luftblase extra Vergnügen bereitet.
- Weder Sie noch Ihr Partner werden das Kondom fühlen, wenn Sie es erst eingeführt haben.
- Auch während der Periode verwendbar


BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG 

## BENUTZUNG DES FRAUENKONDOMS


Prüfen Sie, ob die Verpackung intakt und das MHD nicht überschritten ist. Nehmen Sie das Kondom vorsichtig aus der Verpackung, ohne es mit Fingernägeln, Schmuck o.dgl. zu beschädigen. **Entfalten Sie die Strumpfbänder, nicht das Kondom.**

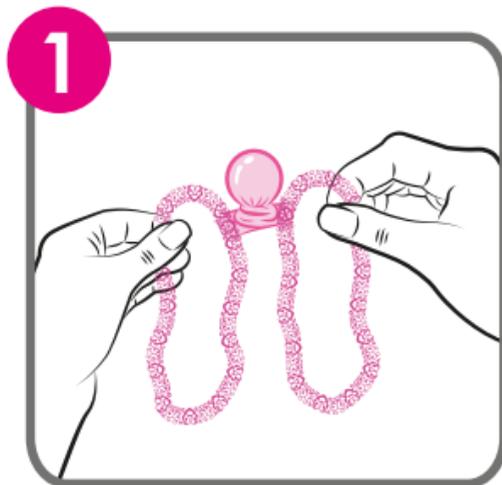


Achten Sie vor dem Anlegen der Strumpfbänder auf die Position der Luftblase. Ziehen Sie die Strumpfbänder so an, **dass die Luftblase nach innen zeigt**, und führen Sie die Blase wie einen Tampon ein. Achten Sie darauf, dass

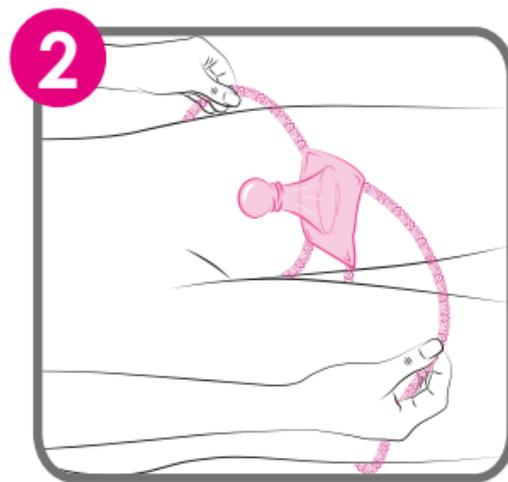

Das „Lady Condom“ sollte vor dem Kontakt mit dem Körper des Partners in die Vagina eingeführt werden, um eine Schwangerschaft und die Übertragung sexuell übertragbarer Krankheiten zu verhindern.

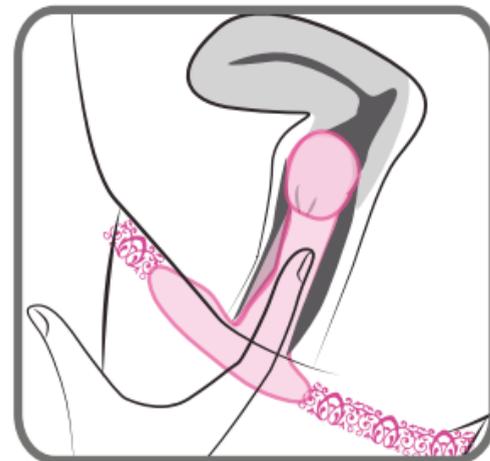


Es wird empfohlen, für höheren Genuss zusätzlich Gleitmittel für den Penis des Partners zu verwenden.

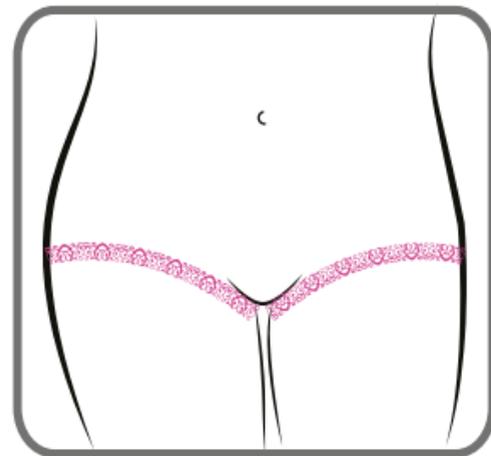

Halten Sie während des ersten Eindringens den Rand fest und führen Sie den Penis vorsichtig ein. Denken Sie auch bei jedem Stellungswechsel daran.



Drehen Sie nach der Ejakulation den äußeren Rand des Kondoms zusammen und ziehen Sie es aus der Vagina; streifen Sie dann die Strumpfbänder ab. Stellen Sie sicher, dass Penis und Vagina sich nicht berühren.

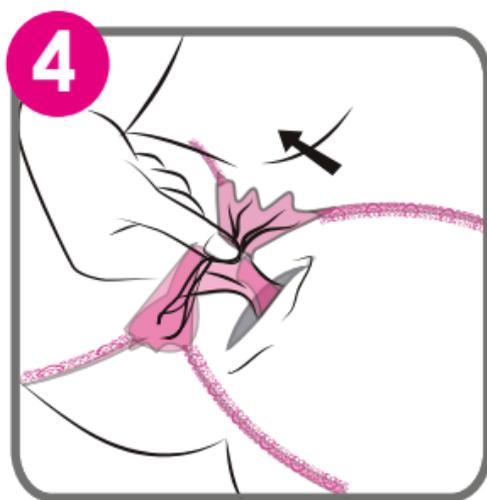

Achten Sie nach dem Gebrauch auf eine hygienische Entsorgung. Wickeln Sie es in ein Papiertuch und entsorgen Sie es im Hausmüll.



## WICHTIGE INFORMATIONEN

- Benutzen Sie das Kondom nicht, wenn es oder die Verpackung beschädigt erscheinen. Entsorgen Sie das beschädigte und verwenden Sie ein neues Kondom aus einer unbeschädigten Packung.
- Bestimmte am Penis oder an der Vagina angewendete Medikamente können das Kondom beschädigen. Fragen Sie Ihren Arzt nach eventuellen Unverträglichkeiten.
- Kondome dürfen nur einmal verwendet werden. Bei mehrmaliger Verwendung bieten sie nicht den gleichen Schutz gegen Schwangerschaft oder Ansteckung und können leichter abrutschen oder reißen.

- Wenn Ihre Verhütungsmethode fehlgeschlagen ist, konsultieren Sie unverzüglich, jedoch nicht später als nach 72 Stunden, einen Arzt.

**Stand: August 2017**